

## HUMIDIFY Löschpapier

---

### Produktbeschreibung

Das HUMIDIFY Löschpapier ist ein weißer Papierstreifen von 6 cm Breite und 16 cm Länge mit einem Gewicht von 300 g/m<sup>2</sup>. Es wurde entwickelt, um die ideale Luftfeuchtigkeit in der SteriBox für den Sterilisationsprozess zu erreichen. Für jeden Sterilisationszyklus muss ein HUMIDIFY Löschpapier verwendet werden, um optimale Bedingungen für den Sterilisationserfolg zu gewährleisten.

### Anwendungshinweise

Der HUMIDIFY Löschpapier Streifen wurde entwickelt, um die entsprechende Menge an Feuchtigkeit in der SteriBox für die Ozonsterilisation freizusetzen.

### Kontraindikationen

Keine.

### Vorsichtsmaßnahmen

Der direkte Kontakt des HUMIDIFY Löschpapier mit Instrumenten sollte vermieden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene Wassermenge auf das HUMIDIFY Löschpapier geben.

### Gebrauchsanweisung

1. Entfernen Sie das Modul aus der SteriBox
2. Legen Sie ein HUMIDIFY Löschpapier auf das Modul
3. Geben Sie 5 ml destilliertes Wasser auf das HUMIDIFY Löschpapier mit einem Flüssigkeitsspender; eine Spritze wird empfohlen, um die entsprechende Menge Wasser hinzuzufügen
4. Setzen Sie das Modul in die SteriBox an den dafür vorgesehenen Aussparungen wieder ein


### Lagerung

- Bei Raumtemperatur (5 – 40°C) trocken (20 – 70% relative Luftfeuchtigkeit) und lichtgeschützt lagern
- Entsorgen Sie das HUMIDIFY Löschpapier nach Gebrauch im Altpapier

### Erläuterung der Symbole

-  Katalognummer
-  Chargennummer
-  Herstellungsdatum
-  Hersteller
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Haltbarkeitsdatum
-  Nicht wiederverwenden
-  Feuchtigkeitsbegrenzung
-  Temperaturbegrenzung
-  Trocken halten
-  Vor Sonnenlicht schützen

Hergestellt in Frankreich für

 **SteriLux SA**  
Chemin du Viaduc 12  
1008 Prilly, Schweiz

© 2022, SteriLux SA.  
Alle Rechte vorbehalten.  
Ausgabedatum: 2022-08