

HUMIDIFY

Carta assorbente

Descrizione del prodotto

La HUMIDIFY Carta Assorbente è una striscia di carta bianca larga 6 cm per 16 cm lunga 300 g/m². È stata progettata per portare il livello di umidità ideale nello SteriBox per il processo di sterilizzazione. Per garantire le condizioni ottimali per il successo della sterilizzazione è necessario utilizzare una HUMIDIFY Carta Assorbente per ogni ciclo di sterilizzazione.

Indicazioni per l'uso

La striscia di HUMIDIFY Carta Assorbente è stata progettata per rilasciare la giusta quantità di umidità nello SteriBox per la sterilizzazione dell'ozono.

Controindicazioni

Nessuna.

Precauzioni

Non mettere la HUMIDIFY Carta Assorbente a diretto contatto con gli strumenti. Accertarsi di posizionare la quantità d'acqua consigliata sulla HUMIDIFY Carta Assorbente.

Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere il modulo dallo SteriBox
2. Collocare una HUMIDIFY Carta Assorbente sul modulo
3. Aggiungere 5 ml di acqua distillata alla HUMIDIFY Carta Assorbente utilizzando un dosatore di liquido; si raccomanda l'uso di una siringa per aggiungere la quantità di acqua appropriata
4. Sostituire il modulo nello SteriBox in corrispondenza delle apposite tacche


Conservazione

- Conservare in luogo asciutto (umidità relativa 20 – 70%) a temperatura ambiente (5 – 40°C) e al riparo dalla luce
- Dopo l'uso, smaltire la HUMIDIFY Carta Assorbente nel contenitore per il riciclaggio

Spiegazione dei simboli

	Numero di catalogo
	Numero di lotto
	Data di produzione
	Produttore
	Fare riferimento alle istruzioni per l'uso
	Data di scadenza
	Limitazione dell'umidità
	Limitazione dell'umidità
	Limite di temperatura
	Conservare all'asciutto
	Tenere lontano dalla luce solare

Prodotto in Francia per

 SteriLux SA
Chemin du Viaduc 12
1008 Prilly, Svizzera

© 2022, SteriLux SA.

Tutti i diritti riservati.

Data di emissione: 2022-08